

Mund-Nasen-Maske mit wechselbarem Einlegevlies und Nasenbügel

Artikel Nr.: MNM 2020-01




Anlegen der Mund-Nasen-Maske

- Es wird empfohlen, die Maske vor dem ersten Gebrauch bei 60°C mit Vollwaschmittel (Wäschenetz) zu waschen.
- Nach dem Waschen und Trocknen – Einlegen des Einlegevlies (C)
 - o Einlegevlies (C) mit der hellblauen Seite (C1) nach außen schieben (vom Gesicht weg), gegebenenfalls zum Einlegen leicht falten



- Anlegen der Maske:
 - o Musterungspfeil (A1) auf der Außenseite der Maske muss in Richtung Stirn zeigen
 - o Innenseite (B) mit Schlitzöffnung (D)
 - o Verknoten der oberen Bänder (E) am Hinterkopf, oberhalb der Ohren
 - o Verknoten der unteren Bänder (F) im Nackenbereich, unterhalb der Ohren
 - o Maske soll eng am Gesicht anliegen, Mund und Nase bedecken
 - o Nasenbügel (G) auf dem Nasenrücken individuell andrücken

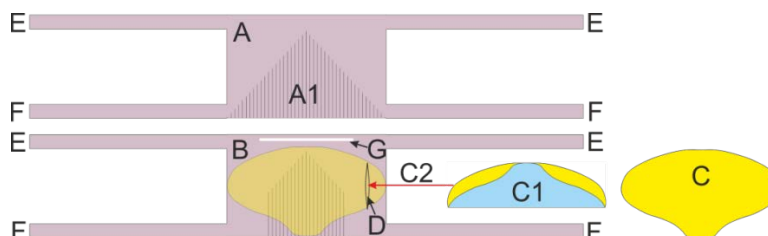


Aufmachung: einzeln im Schnellverschlussbeutel mit Einlegevlies (Einweg)

Technische Daten:

Material – Maske: 100 % Polyester
Material – Einlegevlies: 50 % Polyester / 50 % Polyamid
Nasenbügel: Flachmetallstreifen aus Aluminium

Pflegeanleitung:

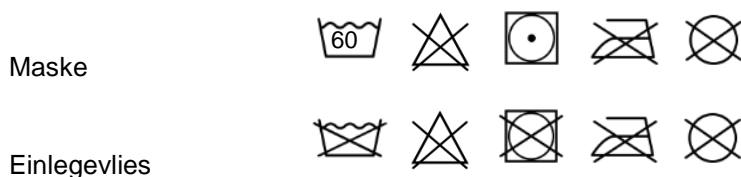

Benutzungshinweise zur Mund-Nasen-Maske

Unsere Mund-Nasen-Maske (Mehrweg) ist eine geeignete Maske, um der Empfehlung der deutschen Bundesregierung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im öffentlichen Raum zu entsprechen (Behelfs-Mund-Nasen-Maske). Die Maske ist für den Gebrauch im öffentlichen Raum, wie zum Beispiel beim Einkauf, in der Schule oder in öffentlichen Verkehrsmitteln vorgesehen und schützt nicht vor eigener Infektion. Diese Maske kann nur mit einem entsprechenden Einlegevlies getragen werden. Sie ist über Mund und Nase zu tragen und nur für eine kurze Tragezeit geeignet. Bei einer Durchfeuchtung ist die Maske abzusetzen, **das Einlegevlies wegzwerfen** und die Maske bei 60° C mit Vollwaschmittel (Wäschenetz) zu waschen. Das Waschen der Maske ist nach jeder Benutzung durchzuführen. Nachbestellung Einlagevlies: imbut GmbH ab einer Menge von 10 VE (1 VE = 10 Stück) oder bei lokalen Händlern. Die jetzt geltenden Abstands- und Hygieneregeln sind trotzdem einzuhalten. Die Hände sind vor und nach Absetzen oder sonstiger Berührung der Maske mit Seife zu waschen. Sie ist kein Medizinprodukt und keine persönliche Schutzausrüstung¹.

Chargen-Nr. MNM 2020-01:

Chargen-Nr. ELV 2020-02:

¹ Keine persönliche Schutzausrüstung wie zum Beispiel gemäß der Norm DIN EN 149:2001-10.